


# exakt S Tablettenteiler

Mit dem exakt S Tablettenteiler haben Sie ein Hilfsmittel erworben, mit dem Sie einfach, sicher und zuverlässig Tabletten bis ca. 10 mm Durchmesser halbieren und vierteln können. Lesen Sie bitte dazu die folgende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

## Hilfe zum exakten und sicheren Teilen von Tabletten

Mit dem Begriff „Tabletten“ wird eine ganze Reihe von unterschiedlichen Arzneiformen bezeichnet, wie z.B. Tabletten, Oblong-Tabletten, Filmtabletten, Retardtabletten, Tablinen usw.. Viele, aber nicht alle dieser „Tabletten“ dürfen geteilt werden.

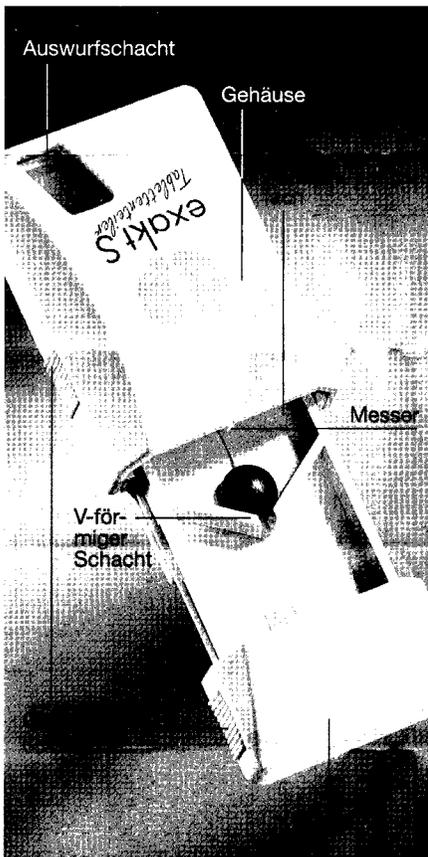

Es sollten nur solche „Tabletten“ geteilt werden, für die in der Gebrauchsinformation (Beipackzettel) im Kapitel „Dosierungsanleitung“ ausdrücklich die Einnahme einer halben oder einer viertel Tablette vorgesehen ist.


Bevor Sie den Tablettenteiler einsetzen, überprüfen Sie deshalb bitte anhand der Gebrauchsinformation der Tabletten, ob diese geteilt werden dürfen oder fragen Sie dazu Ihren Arzt oder Apotheker.

### Gebrauchsanleitung

Umfassen Sie den Tablettenteiler mit Daumen und Zeigefinger an den Griffschalen der Lade und des Gehäuses und ziehen Sie die Lade bis zum Anschlag heraus. Legen Sie nun die Tablette in den V-förmigen Schacht des Tablettenteilers.

Bei Tabletten mit einer eingearbeiteten Bruchrille muß im Einzelfall getestet werden, ob mit der Teilung durch die Bruchrille oder quer zur Bruchrille das bessere Ergebnis erzielt wird.

Schieben Sie nun die Lade in das Gehäuse des Tablettenteilers. Achten Sie dabei darauf, dass sich die Tablette im Zentrum des V-förmigen Schachtes befindet. Ihre Tablette ist danach exakt geteilt. Die eine Hälfte entnehmen Sie durch Umdrehen des Tablettenteilers aus dem Auswurfschacht, die andere Hälfte bleibt bis zur nächsten Einnahme im geschlossenen Aufbewahrungsfach des Tablettenteilers.

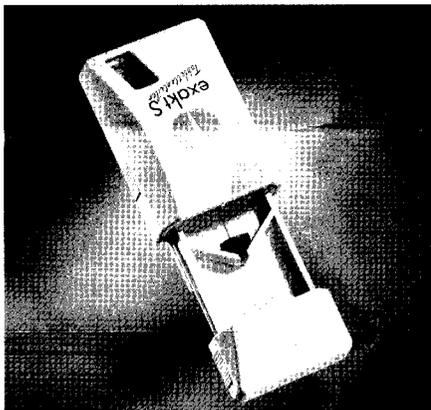

Falls Ihnen der Arzt die Einnahme von 1/4 Tabletten verordnet hat oder dieses in der Dosierungsanleitung des Beipackzettels empfohlen wird, teilen Sie die halbierten Tabletten noch einmal in der oben beschriebenen Weise.

Alle nicht sofort einzunehmenden Tabletten können im Aufbewahrungsfach des Tablettenteilers verbleiben und bei Bedarf entnommen werden.

Achten Sie darauf, dass der Tablettenteiler nicht in die Hände von Kindern gerät.



#### **Reinigung des Tablettenteilers:**

Benutzen Sie zur Reinigung des Tablettenteilers warmes Wasser (nicht über 70 °C) und bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. Ecken und Nischen können mit einer weichen Bürste gesäubert werden. Legen Sie den Tablettenteiler keinesfalls in kochendes Wasser.

Wenn Sie Fragen zum Tablettenteiler haben, schreiben Sie uns bitte – wir antworten.

---

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

---