



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**McMed Augentropfen**<sup>®</sup> sind ein steriler, konservierungsmittelfreier, viskoelastischer, klarer Schutzfilm für die Hornhaut. Sie bestehen ausschließlich aus natürlichen, biologischen Substanzen. **McMed Augentropfen**<sup>®</sup> schützen und befeuchten die Augenoberfläche und machen sie gleitfähig. Dadurch bewirken sie lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden in Zusammenhang mit:

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge
- bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch
- Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

### **Anwendung:**

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Geben Sie ein oder zwei Tropfen in jedes Auge oder auf die Innenseite der Kontaktlinse. Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt!

### **Zusammensetzung:**

Natriumhyaluronat (0,15 %), Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

## Packungsgröße:

Verkaufseinheit: Ein-Dosis-Behältnisse, 15 x 0,35 ml

## Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.
- Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **McMed Augentropfen®** keine Konservierungsmittel enthalten, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge eintropfen.
- Nicht an infizierten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfalldatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.



## Lagerung:

Bei 2° C bis 25° C lagern. Vor Frost schützen.

Chargen-Nummer

LOT

und "verwendbar bis"



sind auf dem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

STERILE A



## Hersteller:

Vitalia Vertriebs GmbH, Beethovenstr. 1a, D-97080 Würzburg

## Vertrieb in Deutschland:

roha Apothekendienste GmbH, Enggasse 1, D-53332 Bornheim

CE 0535