

Hormontest Frau

Speicheltest zur Bestimmung von Estradiol, Estriol und Progesteron

Der Hormontest Frau dient zur **Bestimmung der Steroidhormone Estradiol, Estriol und Progesteron im Speichel**. Die Probe kann selbstständig zu Hause gewonnen und anschließend zur Laboranalyse eingesendet werden.

Die Untersuchung ermöglicht eine labordiagnostische Bestimmung der gemessenen Hormonwerte und kann Informationen zur aktuellen hormonellen Situation liefern. Die Analyse der eingesandten Probe erfolgt in einem spezialisierten Partnerlabor.

Welche Hormone werden bestimmt?

Im Rahmen der Laboruntersuchung werden folgende Hormone im Speichel analysiert:

- Estradiol
- Estriol
- Progesteron

Die Untersuchung kann insbesondere im Zusammenhang mit der Beurteilung des weiblichen Hormonstatus von Interesse sein, beispielsweise bei Fragen zum Zyklus, bei hormonellen Beschwerden oder im Zusammenhang mit einem Kinderwunsch.

Probenentnahme bequem zu Hause

Die benötigte Speichelprobe wird zu Hause entsprechend der beiliegenden Anleitung entnommen. Das Testset enthält die erforderlichen Materialien für die Probengewinnung und den Versand.

Nach der Entnahme werden die Proben gekennzeichnet und mit den vorgesehenen Versandmaterialien an das Labor geschickt. Dort erfolgt die Analyse der Hormonwerte. Anschließend wird ein Laborbefund mit den ermittelten Ergebnissen erstellt.

Inhalt des Testsets

Das Set enthält:

- Anleitung zur Speichelentnahme
- Probenbegleitschein
- Garantieschein
- 3 Speichelgefäße
- 3 Strohhalm
- 3 Etiketten zur Kennzeichnung der Proben
- Versandgefäß
- Versandtasche

So funktioniert der Hormontest

1. Hinweise und Anleitung des Testsets sorgfältig lesen.
2. Speichelproben entsprechend den Vorgaben entnehmen.
3. Proben mit den vorgesehenen Etiketten kennzeichnen.
4. Proben mit den beiliegenden Versandmaterialien an das Labor senden.
5. Laboranalyse und Befund abwarten.

Nach den vorliegenden Anbieterinformationen liegt die Auswertung in der Regel innerhalb von etwa **5 bis 7 Werktagen nach Probeneingang im Labor** vor.

Verwendungszweck

Das Testset ist für die **Gewinnung einer humanen Probe und die anschließende In-vitro-diagnostische Untersuchung in einem Partnerlabor** vorgesehen.

Wichtige Hinweise

Bitte führen Sie die Probenentnahme ausschließlich nach den Angaben der beiliegenden Anleitung durch.

Laborwerte sollten immer im Zusammenhang mit der individuellen gesundheitlichen Situation betrachtet werden. Sie ersetzen keine ärztliche Diagnose. Bei Beschwerden, auffälligen Ergebnissen oder Fragen zur Interpretation des Befundes empfiehlt sich Rücksprache mit einer Ärztin, einem Arzt oder einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachperson.

Eine Erstattung der Kosten durch eine private Krankenversicherung kann nicht grundsätzlich vorausgesetzt werden. Bitte klären Sie eine mögliche Kostenübernahme bei Bedarf vorab mit Ihrer Krankenversicherung.

Hersteller

medivere GmbH
Hans-Böckler-Straße 109
55128 Mainz
Deutschland
info@medivere.de
<https://www.medivere.de>

Durchführendes Labor

GANZIMMUN Diagnostics GmbH
Hans-Böckler-Straße 109
55128 Mainz
Deutschland

Probenmaterial: Speichel